



MASQUES BARRIERES A USAGE NON SANITAIRE CATEGORIE 2

Notice d'utilisation



Composition principale

- **Tissus** : Tissus double couche 100% polyester
→ *Certifiés Oekotex Classe 1*
- **Elastique** : 60% Polyester / 40% Latex
→ *Certifiés Oekotex Classe 1*

Références produits

- ONIMAG-L : Masque barrière à Usage Non Sanitaire – Cat. 2 – 100% Fabriqué en France - Taille Adulte
- ONIMAB-M : Masque barrière à Usage Non Sanitaire – Cat. 2 – 100% Fabriqué en France - Taille Enfant à partir de 6 ans

Domaine d'utilisation

Ce masque est destiné en milieu grand public et professionnel, et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). **Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes.** L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque à visée collective est destiné à protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques. Ce masque est porté par des personnes ayant **des contacts professionnels occasionnels avec d'autres collègues** (entreprise, service, bureau), il est également porté en présence d'autres individus porteurs d'un masque d'une autre catégorie.

Performances

- Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020
Masque catégorie 2
 - Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 70%
 - Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 L./m².s-1 pour une dépression de 100 Pa

Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (rapports RP/20-2899/DGA MNRBC/2000305/N et RP/20-2968/DGA MNRBC/2000305/NP) et qui supporte 10 lavages (rapports RP/20-3354/DGA MNRBC/2000305/NP et RP/20-3608/DGA MNRBC/2000305/NP)

- Répond aux exigences des spécifications AFNOR SPEC S76-001 version 1.10
- Conception établie et testée sur porteur pendant 4 heures par nos soins.

Recommandations et limite d'utilisation

Le temps de port du masque est **limité à 4 heures sur une seule journée.**

Il faut changer le masque :

- quand vous souhaitez boire ou manger
- quand il devient difficile de respirer
- si le masque s'humidifie ou est mouillé par les intempéries
- si le masque est endommagé ou souillé
- si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.
- Si le masque a été positionné sur le front ou sous le menton en position attente

Utilisation du masque **inappropriée pour les enfants de moins de 7 ans.**



Recommandations de manipulation des masques

Avant la première utilisation et après chaque utilisation, le masque doit être lavé en machine – voir conditions de lavages et séchage ci-après.

Lorsque l'on porte un masque :

- Chaque fois que l'on touche le masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique ;
- Eviter de le toucher ; ne pas déplacer le masque




Comment mettre son masque ?



- 1/ Avant de mettre un masque : **se laver les mains** à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ;
- 2/ Prendre le masque par les élastiques et le placer sur le visage ;
- 3/ Passer les élastiques derrière les oreilles sans les croiser ;
- 4/ Appliquer le masque de façon à **recouvrir le nez et la bouche, l'abaisser sous le menton**. Veiller à l'ajuster au mieux sur le visage ;
- 5/ Vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte

Comment retirer son masque ?

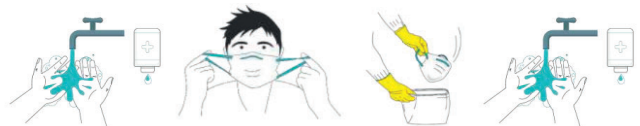

- 1/ **Avant** de retirer un masque : **se laver les mains** à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ;
- 2/ Retirer le masque en saisissant **par l'arrière** les élastiques ;
- 3/ L'enlever en tenant les élastique **sans toucher la partie avant du masque** ;
- 4/ Placer le masque dans un sac et le fermer. Laver le masque (se référer au paragraphe méthode de lavage) ou jeter le sac dans un sac poubelle ;
- 5/ **Se laver les mains** à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.

Entretien du masque

Avant la première utilisation et après chaque utilisation, le masque doit être lavé en machine. Après utilisation, le masque doit être isolé pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.

Explication sur la méthode de lavage



- Lavage en machine avec un produit lessiviel adapté au tissu dont le cycle comprendra au minimum un plateau de **30 minutes à 60°C**.
- Séchage mécanique ou séchage conventionnel, suivi dans les 2 cas d'un repassage à la vapeur à la température compatible avec la composition du masque.
- Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé **50 fois**.

En cas de détection de tout dommage du masque barrière (moindre défaut d'ajustement, déformation, usure, etc.) après un cycle de lavage, le masque barrière est considéré comme non conforme.



Stockage

Masques non utilisés à stoker propres et secs, dans un emballage propre hermétique et à l'abri de la lumière.

Contexte d'utilisation

Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.

Pour plus d'information : <https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus>

AVERTISSEMENTS:

- **Pour protéger votre santé et celles des autres, il est très important de respecter la notice d'information.**
- Ce masque n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants.
- Si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté, demandez l'avis de votre médecin.
- Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).
- Ce masque barrière ne remplace pas les gestes barrière (lavage régulier des mains, distinction physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique permettant à l'utilisateur de protéger son environnement contre les projections de particules. Il peut également apporter à l'utilisateur une protection limitée contre les agents infectieux ;
- Vérifier toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez. Il est recommandé de porter ce masque sur une peau nue, le port de la barbe peut réduire l'efficacité de filtration en dehors des limites visées.
- Le port du masque barrière par des mineurs (ou jeunes utilisateurs) doit faire l'objet d'une observance permanente par une personne qui assiste le jeune utilisateur. Il est considéré que le masque entraînant une difficulté à respirer dans les premières secondes de son port ne convient pas.
- L'attention est portée sur le fait que la protection partielle par les masques barrières de l'utilisateur contre les particules inférieures à 3µm est de 70% minimum, là où le masque de protection respiratoire FFP2, testé dans les conditions du laboratoire, a une performance de l'efficacité de filtration de 94% au minimum.
- Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.